

II° CLASS, 15 MM OVERJET



Dopo un anno di utilizzo dell'EF1

## CONSIGLI SULL'USO OTTIMALE DELL'EF1

Il paziente ed i suoi genitori devono essere motivati all'uso quotidiano del dispositivo: per ottenere dei risultati è comunque necessario un utilizzo minimo di 2 ore di giorno e per tutta la notte.

Poiché è da prevedere un periodo di almeno 6 mesi per raggiungere un risultato visibile e soprattutto efficace, il paziente va costantemente incoraggiato a continuare nell'uso del dispositivo.

Se scattate delle foto nelle diverse fasi del trattamento, Vi sarà più facile dimostrare concretamente al paziente ed ai suoi genitori i risultati: questo ne rafforzerà la motivazione.

Come per ogni dispositivo funzionale, il medico convinto è un medico convincente ed il paziente convinto è un paziente motivato.

## MANUTENZIONE DEL DISPOSITIVO

Dopo l'uso, l'EF1 deve essere sempre risciacquato con acqua fredda; può essere spazzolato con dentifricio 1 volta al giorno. Quando non si indossa, va conservato nella scatola, lasciandola aperta.

L'EF1 esiste in 2 misure ed in 2 colori

•EF1 a partire dai 12 anni  
(DS90 000 - giallo)  
(DS90 001 - trasparente)



DS90 000

•EF2 dagli 8 ai 12 anni  
(DS91 001 - giallo)  
(DS91 003 - trasparente)



DS90 001

Kit (D411 001)

Frese mandrino n°1 (D411 001)  
Frese mandrino n°2 (D411 002)  
Frese mandrino n°3 (D411 003)  
Frese mandrino n°4 (D411 004)  
5 frese n°1 (D411 011)  
5 frese n°2 (D411 012)  
5 frese n°3 (D411 013)  
5 frese n°4 (D411 014)



**DENTALSIM**  
ORTODONZIA

Via Don Spada, 10/C - 20040 CAMBIAGO (MI) ITALY  
Tel. 02.950.676.91 - Fax 02.950.676.92  
e-mail: dentalsim@login.it - www.dentalsim.com