

INTERCETTORE PEDIATRICO

30/06/2016




L'intercettore pediatrico

Elemento ludico

Scudo sottile e morbido

Linguetta di trazione per gli esercizi

Linguetta inter labiale fino alla commessura delle labbra

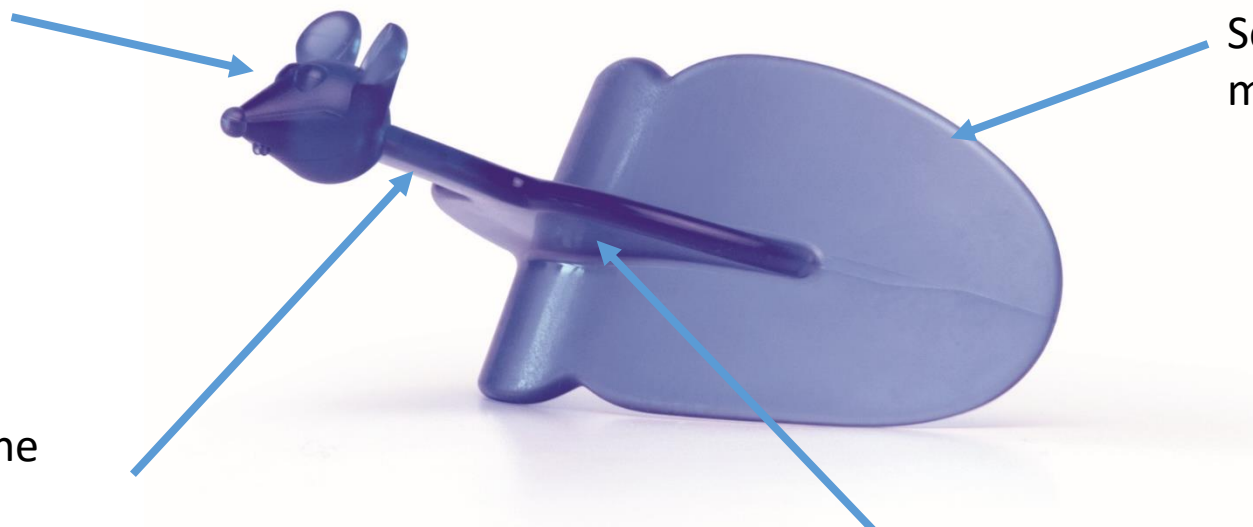

Indicazioni e principi

Indicazioni:

- Deficit della respirazione nasale.
- Sindrome di resistenza accresciuta da vie aeree superiori deboli.
- Roncopatia: l'Intercettore Labiale diminuisce sensibilmente il russamento del paziente.
- Incompetenza labio-labiale
- Correzione di posizionamento spaziale della lingua come della mandibola
- Bruxismo
- Suzione prolungata (pollice, tettarella, oggetto preferito...)

Principi:

- Sostituzione di deficit neuro sensoriale: stimolazione della sensibilità tramite la linguetta interposta tra le labbra e le commessure labiali.
- Inibizione del V nervo trigemino (muscolo masticatorio) attraverso VII nervo facciale (muscoli labiali)
- Conservazione dello spazio libero di riposo interdentale (Free Way Space)
- Oggetto transizionale per i pazienti più piccoli, in caso di abitudine alla suzione troppo prolungata.

Istruzioni dei tempi di utilizzo:

- Da una a due ore di giorno (in versione pediatrica se il suo uso è come « oggetto transizionale », va indossato ogni qualvolta il piccolo paziente vuole utilizzare il suo succhiutto oppure il pollice). Vanno associati dei consigli a carattere profilattico: soprattutto sulla alimentazione e sulla respirazione.
- La notte (specialmente in quei pazienti che soffrono di roncopatia o di OSAS lievi per il posizionamento della mandibola e la riabilitazione della permeabilità delle vie aeree superiori).



I destinatari:

- Sanitari che utilizzano già l'Intercettore Labiale e gli scudi labiali.



Referimenti:

D595 000P	Intercettore Pediatrico Trasparente
D595 000BP	Intercettore Pediatrico Bleu
D595 000RP	Intercettore Pediatrico Rosa

